


Fekalpose

Bruksanvisning

Dansac and Hollister Norge,
Olav Brunborgs vei 4, 4 etg.
Postboks 273, 1377 BILLINGSTAD
Telefon: +47 66 77 66 50
kundeservice.norge@hollister.com

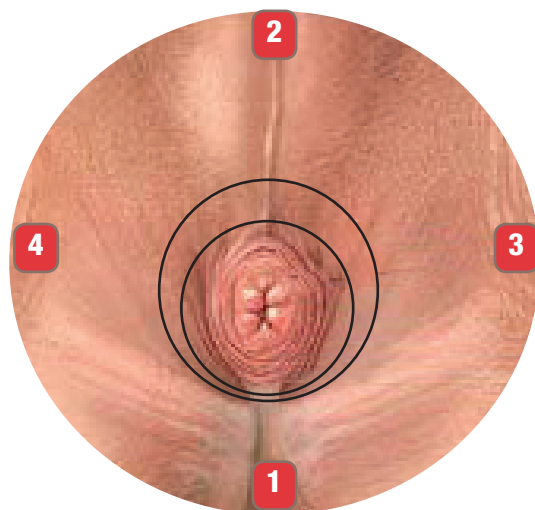

De tre viktige trinnene ved bruk av Hollisters tømbare fekalpose.

Enkel å sette på

Det er tre viktige trinn som må følges for at fekalposen skal fungere optimalt. Sørg alltid for at huden er godt forberedt, og at klebeområdet på posen er varmt. For optimale resultater er det helt nødvendig å holde hydrokolloid-hudplaten på plass **i minst 30 sekunder** slik at maksimal klebeevne oppnås.

1. Forberede



Vask rundt endetarmsåpningen og klipp vekk hår. Sett på tømmeokket. Klipp om nødvendig til hydrokolloidhudplaten slik at den passer rundt endetarmsåpningen. Varm opp klebemiddelet med hånden.

2. Feste



Fjern dekkpapi 1 og 2, og fest hudplaten foran endetarmsåpningen. Fjern deretter 3 og 4 og fest hydrokolloid-hudplaten.

3. Holde



Pass på å holde hydrokolloid-hudplaten på plass i minst 30 sekunder.

Du finner fullstendige påsettingsinstruksjoner i den detaljerte bruksanvisningen på neste side.



Bestillingsinfo for resept til apotek/bandagist



9822



9821

Produktnr Farma produktnr	Volum	Eske Stk
9822/ 851675	500 ml (25 cm) Medium	10
9821/ 851683	1000 ml (30 cm) Large	10

Sykehus bestiller i henhold til gjeldende avtale med sykehuset.

Kontakt sykehuset/avdelingens innkjøpsansvarlig for informasjon og bestilling.

Apotek, bandagister og andre bestiller enten manuelt (ikke elektronisk) i Farmapro eller på epost/tlf:

kundeservice.norge@hollister.com • Telefon: +47 66 77 66 50

www.hollister.no

Detaljert bruksanvisning


Forberede huden

Klipp omhyggelig bort hår rundt endetarmsåpningen. Klipp så nær huden som mulig. Bruk ikke barbermaskin. Vask området med mild såpe og vann. Skyll grundig og tørk huden helt før du fortsetter. Fyll ut ujevne fordypninger i området rundt endetarmsåpningen med en hudbeskyttende krem.


Feste den tømbare fekalposen



Få pasienten til å legge seg på siden med det øverste kneet opp mot brystet for å eksponere området rundt endetarmsåpningen. Pasienten skal ligge i denne stillingen under hele påsettingsprosedyren. Fjern posen og kast plasttrekket som beskytter hudplaten. **Sett på lokket på tømmeåpningen.**

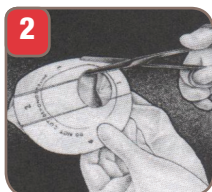

Åpningen i hudplaten kan gjøres større om nødvendig, men klipp ikke utenfor linjen som er angitt på beskyttelsespapiret.

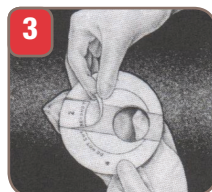

Fjern dekkpapiret fra de delene av hudplaten som er nummerert 1 og 2.



Brett platen i to og skill pasientens rumpeballer for å eksponere området rundt endetarmsåpningen. **Kvinnelige pasienter:** Fest den minste delen av platen (nummerert 1) til huden mellom anus og vagina.




Trykk platen fast mot huden for å sørge for sikker klebing. **Mannlige pasienter:** Fest denne delen av platen (nummerert 1) mellom anus og skrotum.



Plasser den øverste delen av den eksponerte hudplaten (nummerert 2) mot det kokkygeale området og trykk fast mot huden. Slipp rumpeballene, slik at de får en avslappet stilling.



Fjern dekkpapiret fra den delen av hudplaten som er nærmest pasientens nedre rumpeballe (nummerert 3 eller 4, avhengig av pasientens stilling). Trykk platen fast mot huden.

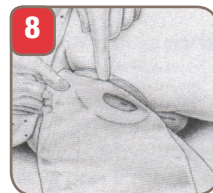

Fjern den siste biten med dekkpapir (nummerert 3 eller 4) og plasser hudplaten mot huden. **Forsikre deg om at alle punkter på platen kleber fast mot huden.**

Tømme posen



Få pasienten til å legge seg på siden for å få tilgang til posen. Plasser et bekk eller en annen beholder under tømmeåpningen, og ta av lokket. Når posen er tom, tørk av rundt tømmeåpningen med en papirserviett og sett på et nytt lokk. For kontinuerlig oppsamling kan den tømbare avføringsposen kobles til en oppsamlingspose ved siden av sengen med standard slanger.



I øvre del av posen sitter en gassventil som lar gass slippe ut, slik at posen ikke blåses opp.

Fjerne fekalposen



Trekk hudplaten forsiktig av pasientens hud.



Forsegle posen ved å brette hudplaten i to slik at den klistres til seg selv. Følg lokale retningslinjer for smittekontroll og kast posen på forsvarlig måte. **Den må ikke skylles ned i toalettet.**