



Bruksanvisning VaPro Plus Pocket™ katetre

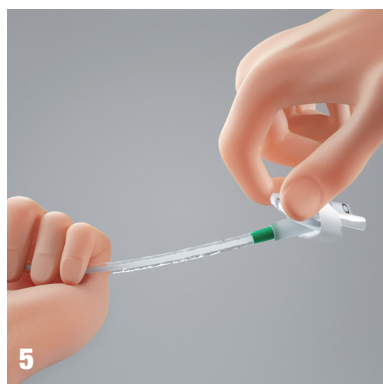

1. Finn frem det du trenger og gjør området klart.
2. Vask hendene som anbefalt av helsepersonell.
3. Posisjoner deg slik at du kan utføre en intermitterende kateterisering. Tilpass klærne slik at du har tilgang til kjønnsorganet ditt.
- 4a. Åpne forpakningen ved å trekke øverste fingerhull mot deg og hele veien ned.

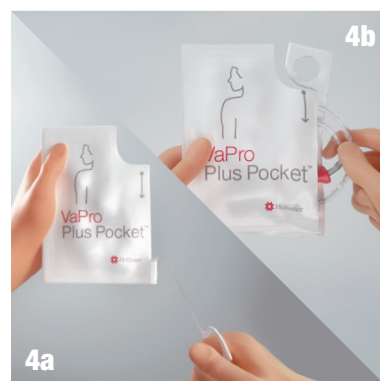


- 4b. Ta kateteret ut av forpakningen.
5. Med urinoppsamlingsposen vendt opp, hold kateteret i en hånd mens du skyver posen bort fra kateteret med den andre hånden for å bryte papirbåndet. Brett ut urinoppsamlingsposen. Legg kateteret på fanget, vasken eller en annen flat overflate.
6. Bruk den ikke-dominerende hånden din og spre kjønnsleppene med to fingre. Rengjør området rundt urinrørsåpningen slik du ble opplært til av helsepersonell.



7. Fjern hetten fra beskyttelsestuppen på kateteret.
8. Hold kateteret med én hånd. Med den andre hånden fører du kateteret fremover til tuppen av kateteret fyller beskyttelsestuppen men ikke kommer utenfor.
9. Hold kateteret under platen på den beskyttende tuppen.



VaPro Plus Pocket™
No Touch Intermittent Catheter

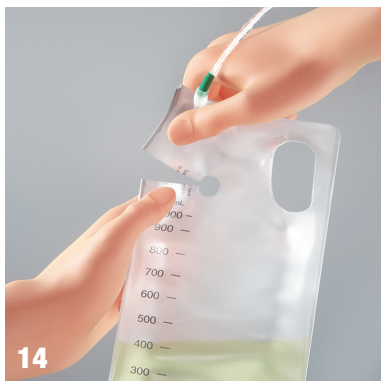

10. Spre kjønnsleppene med to fingre og før beskyttelsestuppen inn til platen kommer i kontakt med urinrørsåpningen.
11. Slipp kjønnsleppene og hold beskyttelsestuppen på plass med fingrene på den ikke-dominerende hånden din. Med din dominerende hånd, før kateteret inn til urin begynner å renne.
12. Når urinstrømmen har stoppet trekker du kateteret sakte ut. Dersom urin begynner å renne igjen, ta en pause til det stanser. Når du er sikker på at blæren er tømt fjerner du kateteret fullstendig.
13. Etter kateterisering, hold urinoppsamlingsposen i håndtaket.
14. For å tømme urinoppsamlingsposen før den kastes, riv ved pilen merket "Tear here to empty".
15. Kast kateteret, urinoppsamlingsposen og forpakningen i en avfallsbeholder. MÅ IKKE KASTES I TOALETET.
16. Vask hendene.



ADVARSEL: Brukes kun én gang for å redusere faren for infeksjon og/eller komplikasjoner

ADVARSEL: Dersom du opplever ubehag eller tegn på traume, avslutt bruk umiddelbart og kontakt helsepersonell

- Klart til bruk, intermitterende kateter til engangsbruk
- Beskyttende tupp og hylse bidrar til berøringsfri innføringsteknikk
- Fargekodet kateterskaft indikerer kateterets størrelse
- 1000 ml urinoppsamlingspose

- Hydrofilt, ftalatfritt kateter
- 2 ultraglatte kateterøyne
- Beskyttelseshette med ring - enkel å fjerne
- Inneholder ikke lateks

INDIKASJONER FOR BRUK

Dette intermitterende kateteret er et fleksibelt rør som føres inn i urinrøret på mannlige og kvinnelige pasienter som trenger å tømme blæren

FORHOLDSREGL: Rådfør deg med helsepersonell før bruk, dersom du opplever noen av følgende tilstander:

- Smerter i urinrøret
- Uttalt forsnævring
- Uretritt - betennelse i urinrøret
- Epididymitt - bitestikkelbetennelse
- Uforklarlig blødning fra urinrøret
- "Falsk" passasje
- Prostatitt - betennelse i prostata

FORHOLDSREGL: Selvkateterisering må følge behandlingsplanen og skal kun utføres etter medisinsk rådgivning i samsvar med angitte anvisninger. Fordi kateteriseringsfrekvens varierer fra person til person, bør anbefalt frekvens for kateterisering oppgis av helsepersonell. Ta kontakt med helsepersonell for ytterligere spørsmål.

NB: Forpakningen skal oppbevares liggende og i normal romtemperatur. Dette produktet består av polyurethan-omslag, termoplastisk elastomer tupp og rør uten DEHP.

Dansac and Hollister Norge

Postboks 273
1377 Billingstad
66 77 66 50
kundeservice.norge@hollister.com
www.hollister.no