

Brukerveiledning VaPro Plus Pocket™ katetre



1. Finn frem det du trenger og gjør området klart.


2. Vask hendene som anbefalt av helsepersonell.

3. Posisjoner deg for å utføre intermitterende kateterisering. Tilpass klærne slik at du har tilgang til genitaliene.

4a. Åpne forpakningen ved å dra fingerhullet mot deg og hele veien ned.




4b. Ta kateteret ut av forpakningen.

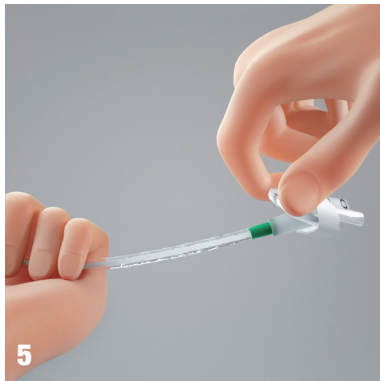

5. Med urinoppsamlingsposen vendt opp, hold kateteret i den ene hånden. Med den andre hånden skyver du posen vekk for å bryte papirbåndet. Brett ut urinoppsamlingsposen. Legg kateteret i fanget, på vasken eller på en annen rett overflate.

6. Hold penis med din ikke-dominerende hånd helt til du er ferdig med prosedyren. Dra forhuden tilbake dersom den finnes og rens glansen slik du ble opplært av helsepersonell.

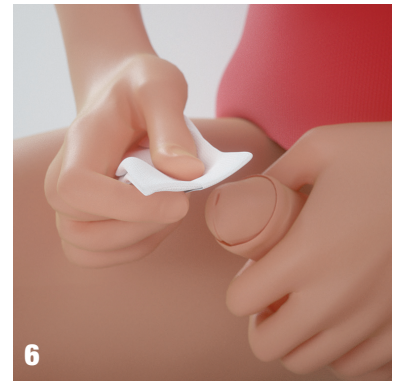

7. Fjern hetten fra den beskyttende tuppen på kateteret.

8. Hold kateteret med én hånd, med den andre fører du kateteret fremover til tuppen av kateteret fyller beskyttelsestuppen, men ikke kommer utenfor.

9. Hold kateteret under platen på den beskyttende tuppen.



VaPro Plus Pocket™



No Touch Intermittent Catheter



10. Med fingrene og pekefingeren på din ikke-dominerende hånd, trykk forsiktig på glans for å utvide urinrørsåpningen. Med din dominerende hånd, før den beskyttende tuppen inn til platen kommer i kontakt med urinrørsåpningen.

11. Før kateteret inn til urin begynner å renne.

12. Når urinstrømmen har stanset, dra kateteret sakte ut. Dersom urin begynner å renne igjen, ta en pause til det stanser. Når du er sikker på at blæren er tom, fjern kateteret fullstendig. Skyv forhuden tilbake (dersom denne finnes).

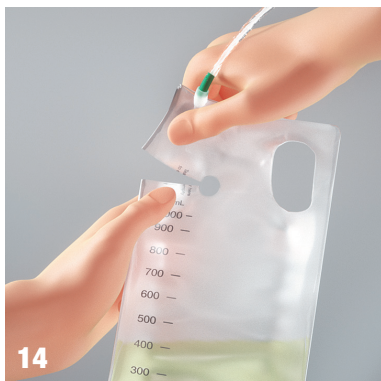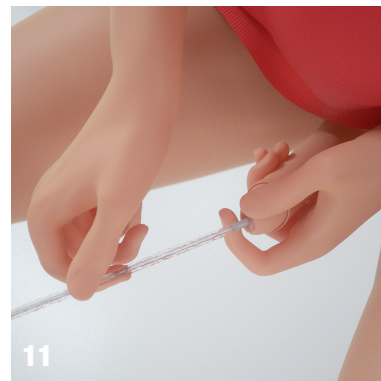

13. Etter kateterisering, hold urinoppsamlingsposen i håndtaket.

14. For å tømme urinoppsamlingsposen før den kastes, riv ved pilen (merket "Tear here to empty") for å tømme.

15. Kast kateteret, posen og forpakningen i egnet beholder. MÅ IKKE KASTES I TOALETET.

16. Vask hendene.



ADVARSEL: Brukes kun én gang for å redusere faren for infeksjon og/eller komplikasjoner.

ADVARSEL: Dersom du opplever ubehag eller tegn på traume, avslutt bruk umiddelbart og kontakt helsepersonell.

- Klart til bruk, intermitterende kateter med urinoppsamlingspose til engangsbruk
- Beskyttende tupp og hylse bidrar til berøringsfri innføringsteknikk
- Fargekodet kateterskaft indikerer kateterets størrelse
- 1000 ml urinoppsamlingspose
- Hydrofilt, ftalatfritt kateter
- 2 ultraglatte kateterøyne
- Beskyttelseshette som er enkel å fjerne
- Inneholder ikke lateks

INDIKASJONER FOR BRUK

Dette intermitterende kateteret er et fleksibelt rør som føres inn i urinrøret på mannlige, kvinnelige og pediatriske pasienter som trenger å tømme blæren.

FORHOLDSREGL: Rådfør deg med helsepersonell før bruk, dersom du opplever noen av følgende tilstander:

- Smerter i urinrøret
- Uttalt forsnevring
- Uretritt - betennelse i urinrøret
- Epididymitt - bitestikketbetennelse
- Uforklarlig blødning fra urinrøret
- "Falsk" passasje
- Prostatitt - betennelse i prostata

FORHOLDSREGL: Selvkateterisering må følge behandlingsplanen og kun utføres etter medisinsk rådgivning i samsvar med angitte anvisninger. Fordi kateteriseringsfrekvens varierer fra person til person, bør anbefalt frekvens for kateterisering oppgis av helsepersonell. Ta kontakt med helsepersonell for ytterligere spørsmål.

NB: Forpakningen skal oppbevares liggende og i normal romtemperatur.

Dette produktet består av: hylse i polyuretan, tupp av termoplastisk elastomer og slanger som ikke er fremstilt av ftalater

Reseptbelagt

Dansac and Hollister Norge

Postboks 273
1377 Billingstad
66 77 66 50
kundeservice.norge@hollister.com
www.hollister.no



Scan for å se video