



VaPro™ katetre

Brukerveiledning for menn

VaPro

Berøringsfritt Intermitterende kateter

Innholdsfortegnelse

Innhold	Side
Forstå urinveiene	2-3
Urinveisinfeksjoner	4
Intermitterende kateterisering	5
Valg av intermitterende kateter	6-7
VaPro Pocket™ berøringsfritt intermitterende kateter	8-13
VaPro Plus Pocket™ berøringsfritt intermitterende kateter	14-19
VaPro™ berøringsfritt intermitterende kateter (inkludert F-Style og Tiemann Tupp)	20-25
VaPro Plus™ berøringsfritt intermitterende kateter	26-31
Bestillingsinformasjon	32-33

Forstå urinveiene

Urinveiene består av nyrer, urinledere, blære, urinrør, indre og ytre lukkemuskler og muskler. Alle delene har sin unike rolle i filtreringsprosessen.

Nyrer

Nyrene filtrerer vann og enkelte avfallsstoffer fra blod for å lage urin. Nyrene produserer normalt 30-80 ml urin i timen. Urin transporteres fra nyrene gjennom urinlederne til blæren, hvor den lagres midlertidig frem til du urinerer.

Urinledere

Hos voksne menn er urinlederne ca 28-36 cm lange. De er utformet for å hindre at urin strømmer tilbake i blæren. Muskelsammentrekninger i urinlederne skyver urinen fra nyrene ned til blæren.

Blære

Blæren er et hult organ med en muskulær vegg som har to hovedfunksjoner – oppsamling og tømning av urin. Hos voksne kan blæren i avslappet tilstand holde ca 480 ml urin før du føler en sterk trang til å urinere. Blærens størrelse, form og kapasitet varierer fra person til person.

Urinrør

Urinrøret er røret som leder urin fra blæren og ut av kroppen. Det er et muskulært rør med slimhinner på innsiden og en åpning i enden. Hos menn er urinrøret 20-26 cm langt og er formet som en S-formet kurve fra blæren, gjennom prostata og bekkenbunnen, og ut i tuppen av penis.

Lukkemuskler

Lukkemusklene er to ringformede muskler (kalt indre og ytre lukkemuskler) som omgir urinrøret. Den ytre lukkemuskelen er den som kontrollert trekkes sammen når du urinerer.


Muskelsammentrekninger, både frivillig og ufrivillig, er involvert i urinering. Blæremusklene trekker seg sammen og lukkemusklene åpner. Musklene i bekkenbunnen består av flere små muskler som omgir urinrøret og rektum. De støtter opp musklene i bekkenet og bidrar til å holde urinrøret på plass.

Nervesystemets rolle


Urineringsprosessen involverer koordinering mellom blæren, lukkemusklene og et intakt nervesystem. Et friskt, funksjonelt nervesystem og hjernen er svært viktige for riktig koordinering av denne komplekse prosessen, som kan forenkles i disse tre trinnene:

1. Når blæren er full sendes nerveimpulser til den nederste delen av ryggmargen
2. Deretter fortsetter disse impulsene til hjernen for å kommunisere at blæren er full
3. Hjernen sender så en beskjed til blæren om å trekke seg sammen slik at den tømmes for urin

Mannlige urinveier sett forfra

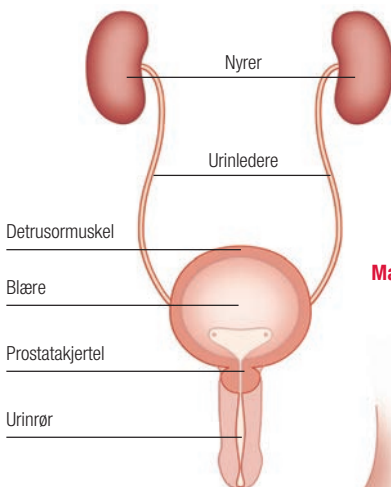

Mannlige urinveier sett fra siden

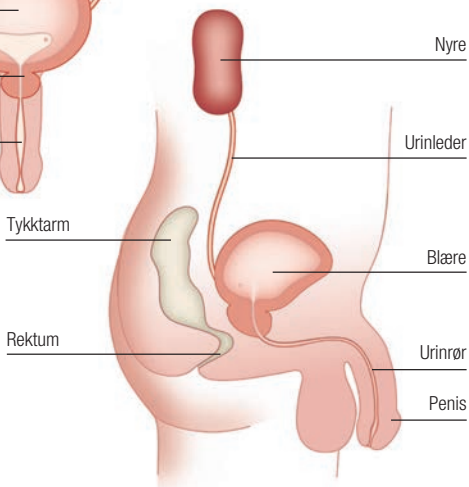

Urinveisinfeksjoner

Ikke alle utvikler disse symptomene. Kontakt helsepersonell dersom du ikke føler deg bra eller mistenker at du har en infeksjon. Det er viktig å kontakte helsepersonell ved første tegn på urinveisinfeksjon.

Urinveisinfeksjoner (UVI)

Urinveisinfeksjoner er nesten alltid forårsaket av bakterier fra menneskets egen tarmflora. Den vanligste bakterien er E. coli. Når menn får urinveisinfeksjoner kommer det ofte ved prostataplager, når de ikke får tømt urinblæren skikkelig. Når urinen samles i blæren øker risikoen for en bakterieansamling. Det kan også være en sammenheng mellom det å tømme blæren sjeldent og hyppige urinveisinfeksjoner. Ufullstendig blæretømming kan føre til at eventuelle bakterier i urinen får større mulighet til å utvikle infeksjon.

Det er viktig at du er oppmerksom på eventuelle tegn på urinveisinfeksjon og kontakter helsepersonell umiddelbart dersom de oppstår. Symptomer kan være:

- Hyppigere urinering enn vanlig
- Lekkasje av urin mellom normal urinering eller kateterisering
- Økte muskelspasmer (dersom du har en ryggmargsskade)
- Feber
- Smerter i ryggen
- Melkeaktig, uklar eller mørk urin
- Urin som lukter vondt




Intermitterende kateterisering

Det finnes mange typer av intermitterende kateter. Å forstå de ulike egenskapene vil hjelpe deg å velge det kateteret som er riktig for deg. Du finner alle våre intermitterende kateter på www.vapro.no

Til forskjell fra et inneliggende kateter, som ligger i blæren over lengre tid, er intermitterende kateterisering innføring og fjerning av et kateter flere ganger om dagen for å tømme urinblæren. Mennesker som utfører intermitterende kateterisering bør følge den kateriseringsfrekvensen de har blitt anbefalt av helsepersonell.

Intermitterende kateterisering er enkelt å lære og er en vanlig måte for mennesker med blæreproblemer å håndtere situasjonen sin på. Utstyret kan diskret tas med i en lomme eller veske, og selve prosedyren går ganske raskt. Før du setter i gang må du få opplæring i hvordan kateteret skal brukes. Du må være i stand til å nå frem til urinrørsåpningen og håndtere kateteret. Urinen kan tømmes igjennom kateteret ut i toalettet eller en urinoppsamlingspose.

Mennesker i alle aldre kan lære seg å utføre intermitterende kateterisering. En omsorgsperson eller et familiemedlem kan også utføre intermitterende kateterisering dersom du ikke klarer det selv. Sammen med helsepersonell finner du den løsningen som passer best for deg.

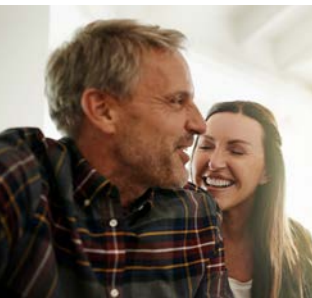

Valg av intermitterende kateter

Størrelse og utforming

Katetre leveres i forskjellige størrelser, materialer og utforminger.

Kateterstørrelsen angis med Charrières skala (forkortet Ch), som måler diameter. En charrière tilsvarer 1/3 millimeter. De vanligste størrelsene for voksne personer er Ch 12 og Ch 14. Legen din vil forskrive den riktige størrelsen for deg.

Kateteret føres inn i urinrøret og når det er inne i blæren vil urinen begynne å renne. Urinrørets lengde vil variere fra person til person. Menn kan med fordel bruke lange katetre på ca 40 cm.

Hva skal du se etter når det gjelder et intermitterende kateter

Legen din eller annet helsepersonell vil avgjøre hvilken kateterstørrelse som er riktig for deg. Den riktige størrelsen vil gjøre at du enkelt kan føre kateteret inn i urinrøret og effektivt tømme blæren for urin. Kateteret må være stort nok til at urinen kan strømme fritt uten at urinrøret skades.

Når du velger kateter, bør du passe på at det er:

- Biokompatibelt (for å unngå allergiske reaksjoner)
- Fleksibelt slik at det enkelt tilpasser seg konturene i urinrøret
- Skånsomt og behagelig under innsetting og uttrekking
- Enkelt å bruke
- Klart til bruk uten ekstra utstyr eller prosedyrer
- Berøringsfritt for potensielt å redusere risikoen for infeksjon (du kan sette inn kateteret rett fra forpakningen uten å måtte berøre det)

Be om råd dersom du har spørsmål eller trenger hjelp til å velge.

VaPro berøringsfrie intermitterende katetre

VaPro katetre gir 100% berøringsfri beskyttelse med beskyttende tupp og hylse

VaPro katetre har hygienisk utforming som bidrar til å beskytte brukerne fra bakterier gjennom hele kateteriseringsprosessen.

Beskyttende tupp

- beskytter det sterile kateteret mot bakterier som finnes i de ytterste 15 mm av det distale urinrøret
- bidrar til å redusere risikoen for at bakterier kommer inn i urinrøret

Beskyttende hylse

- bidrar til at man kan holde hvor som helst på kateteret
- danner en barriere som hindrer bakterier i å komme i kontakt med kateteret



Den beskyttende tuppen er utformet for bruk av både menn og kvinner


Den beskyttende tuppen reduserer risikoen for at bakterier kommer inn i urinrøret ved innsetting av kateteret. Denne illustrasjonen viser hvor effektivt det fungerer på menn.



Kateteret føres inn i den beskyttende tuppen som igjen føres inn i urinrørsåpningen.



Den beskyttende tuppen bidrar til å beskytte kateteret mot bakterier som hovedsakelig finnes i de ytterste 15 mm av urinrøret.

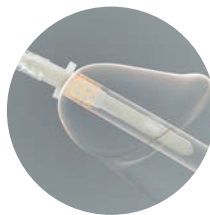

Den beskyttende tuppen bidrar til å forhindre at kateteret blir kontaminert.

VaPro Pocket kateter

Rød hette

bidrar til å holde den beskyttende tuppen ren og beskyttet etter forpakningen er åpnet

Beskyttende hylse

gjør at kateteret kan holdes hvor som helst og utgjør en barriere mot bakterier



Lommeformat

for diskret bruk utenfor hjemmet

Beskyttende tupp

En beskyttende tupp som er 50%* mindre i størrelse og mer ergonomisk formet, for mer behagelig innsetting

Transparent beskyttelsestupp bidrar til god visualisering

Bidrar til å beskytte mot bakterier lokalisert i de ytterste 15 mm av det distale urinrøret




50%* mindre beskyttelsestupp,
fortsatt 100% berøringsfri beskyttelse

*Målt som volum av brukt materiale.

VaPro Pocket kateter – brukerveiledning



Finn frem det du trenger og gjør området klart. Vask hendene som anbefalt av helsepersonell.

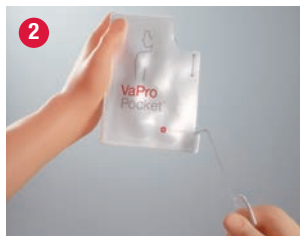


Posisjoner deg for å utføre intermitterende kateterisering. Tilpass klærne slik at du har tilgang til genitaliene.

For å åpne forpakningen, dra fingerhullet mot deg og hele veien ned.




Ta kateteret ut av forpakningen. Legg forpakningen i fanget, på vasken eller på en annen rett overflate. Legg kateteret på den åpne forpakningen

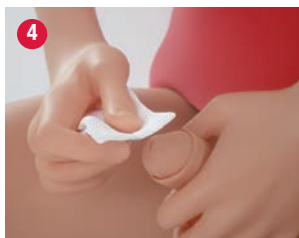

Hold penis med din ikke-dominerende hånd helt til du er ferdig med prosedyren. Trekk forhuden tilbake (om denne finnes). Penishodet (glans) og urinrørsåpningen vaskes daglig, slik du ble opplært av helsepersonell.



Fjern hetten fra den beskyttende tuppen på kateteret.

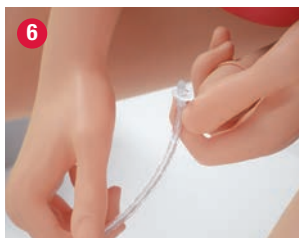

Hold kateteret med én hånd, med den andre fører du kateteret fremover til tuppen av kateteret fyller beskyttelsestuppen, men ikke kommer utenfor.


Hold kateteret under platen på den beskyttende tuppen.

Se neste side for steg 7-10

VaPro Pocket kateter – brukerveiledning



Med fingrene og pekefingeren på din ikke-dominerende hånd, trykk forsiktig på glans for å utvide urinrørsåpningen. Med din dominerende hånd, før den beskyttende tuppen inn til platen kommer i kontakt med urinrørsåpningen.

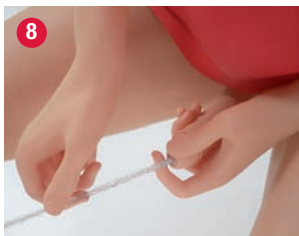

Før kateteret inn til urin begynner å renne.

Når urinstrømmen har stanset, trekk kateteret sakte ut. Dersom urin begynner å renne igjen, ta en pause til det stanser. Når du er sikker på at blæren er tom, fjern kateteret fullstendig. Skyv forhuden tilbake (dersom denne finnes).



Kast kateteret, posen og forpakningen i egnet beholder. MÅ IKKE KASTES I TOALETET.



Vask hendene.

Forslag til stillinger for kateterisering



VaPro Plus Pocket kateter

Rød hette

bidrar til å holde den beskyttende tuppen ren og beskyttet etter forpakningen er åpnet

Beskyttende hylse

gjør at kateteret kan holdes hvor som helst og utgjør en barriere mot bakterier



Lommeformat

for diskret bruk utenfor hjemmet

Beskyttende tupp

En beskyttende tupp som er 50%* mindre i størrelse og mer ergonomisk formet, for mer behagelig innsetting

Transparent beskyttelsestupp bidrar til god visualisering

Bidrar til å beskytte mot bakterier lokalisert i de ytterste 15 mm av det distale urinrøret

1000 ml urinopsamlingspose

For kateterisering hjemme eller på farten

Urinopsamlingsposen er enkel å åpne og enkel å tømme for renere håndtering

Tilbakeslagsventil hindrer tilbakestrømming av urin

Transparent for visuell vurdering av urinfargen og måleenheter printet på posen for kontroll av urinvolumet



50%* mindre beskyttelsestupp,
fortsatt 100% berøringsfri beskyttelse

*Målt som volum av brukt materiale.

VaPro Plus Pocket kateter – brukerveiledning




Finn frem det du trenger og gjør området klart. Vask hendene som anbefalt av helsepersonell.

Posisjoner deg for å utføre intermitterende kateterisering. Tilpass klærne slik at du har tilgang til genitaliene.




a. Åpne forpakningen ved å dra fingerhullet mot deg og hele veien ned.

b. Ta kateteret ut av forpakningen.

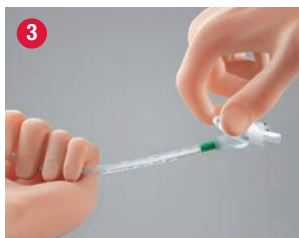


Med urinoppsamlingsposen vendt opp, hold kateteret i den ene hånden. Med den andre hånden skyver du posen vekk for å bryte papirbåndet. Brett ut urinoppsamlingsposen. Legg kateteret i fanget, på vasken eller på en annen rett overflate.

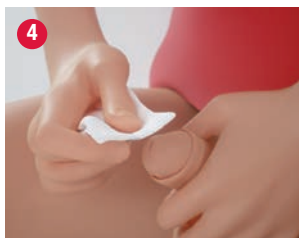

Hold penis med din ikke-dominerende hånd helt til du er ferdig med prosedyren. Trekk forhuden tilbake (om denne finnes). Penishodet (glans) og urinrørsåpningen vaskes daglig, slik du ble opplært av helsepersonell.



Fjern hetten fra den beskyttende tuppen på kateteret.

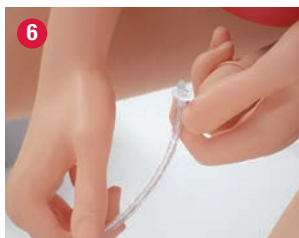

Hold kateteret med én hånd, med den andre fører du kateteret fremover til tuppen av kateteret fyller beskyttelsestuppen, men ikke kommer utenfor.


Hold kateteret under platen på den beskyttende tuppen.

Se neste side for steg 7-10

VaPro Plus Pocket kateter – brukerveiledning



Med fingrene på din ikke-dominerende hånd, trykk forsiktig på glans for å utvide urinrørsåpningen. Med din dominerende hånd, før den beskyttende tuppen inn til platen kommer i kontakt med urinrørsåpningen.

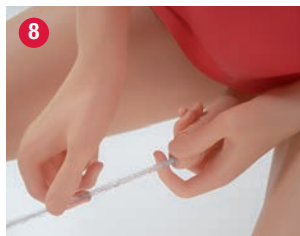

Før kateteret inn til urin begynner å renne.

Når urinstrømmen har stanset, trekk kateteret sakte ut. Dersom urin begynner å renne igjen, ta en pause til det stanser. Når du er sikker på at blæren er tom, fjern kateteret fullstendig. Skyv forhuden tilbake (dersom denne finnes).



Etter kateteriseringen, hold urinoppsamlingsposen i håndtaket.

For å tømme urinoppsamlingsposen før den kastes, riv ved pilen (merket "Tear here to empty") for å tømme.



Kast kateteret, posen og forpakningen i egnet beholder. MÅ IKKE KASTES I TOALETET.



Vask hendene.

Forslag til stillinger for kateterisering




VaPro kateter

Rød hette

bidrar til å holde den beskyttende tuppen ren og beskyttet etter forpakningen er åpnet

Beskyttende tupp

bidrar til å beskytte mot bakterier lokalisert i de ytterste 15 mm av det distale urinrøret

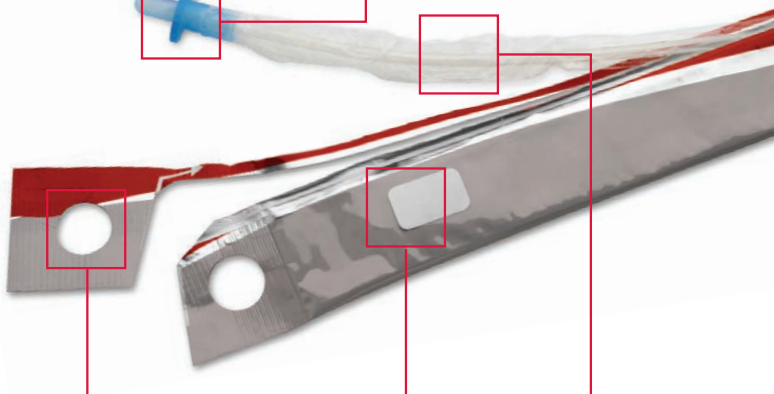

Brukervennlig forpakning

Stort fingerhull med rivestripe som bidrar til at det blir enkelt å åpne forpakningen

Beskyttende hylse

gjør at kateteret kan holdes hvor som helst og utgjør en barriere mot bakterier

Selvklebende merke

gjør det mulig å feste forpakningen til en hard overflate

Ferdigfuktet membran

hygienisk og avansert pre-hydrering av kateteret (på innsiden av forpakningen)



VaPro F-Style og Tiemann tupp

VaPro

Berøringsfritt intermitterende kateter

F-Style

VaPro F-Style kateter, et fastere kateter som gir brukerne friheten til å velge økt fasthet, i tillegg til den ekstra beskyttelsen VaPro katetre gir.

VaPro

Berøringsfritt intermitterende kateter

med Tiemann tupp

VaPro kateter med Tiemann tupp.

Tiemann-tuppen er utformet for å gjøre det enklere å manøvrere i et smalt urinrør med uregelmessigheter. Tiemann kateter passer for menn som har forstørret prostata eller andre strikturer.




VaPro kateter – brukerveiledning



Finn frem det du trenger og gjør området klart. Vask hendene som anbefalt av helsepersonell.

Posisjoner deg for å utføre intermitterende kateterisering. Tilpass klærne slik at du har tilgang til genitaliene.

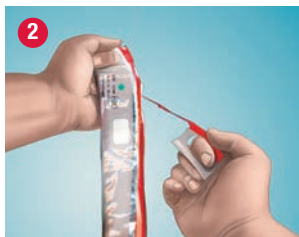

For å åpne forpakningen, dra fingerhullet mot deg og hele veien ned.

Hvis du ønsker, bruk det selvklebende merket på forpakningen for å feste kateteret mot en overflate mens du gjør deg klar til kateterisering.



Fjern kateteret fra forpakningen.

Legg kateteret i fanget, på vasken eller på en annen rett overflate.



Hold penis med din ikke-dominerende hånd helt til du er ferdig med prosedyren. Trekk forhuden tilbake (om denne finnes). Penishodet (glans) og urinrørsåpningen vaskes daglig, slik du ble opplært av helsepersonell.



Fjern den røde hetten fra kateterets beskyttelsestupp.




Hold tømmebussen over toalettet eller annen egnet beholder.

Se neste side for steg 7-10

VaPro kateter – brukerveiledning



Hold kateteret med én hånd, med den andre fører du kateteret fremover til tuppen av kateteret fyller beskyttelsestuppen, men ikke kommer utenfor.

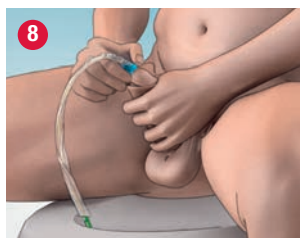

Hold kateteret under platen på den beskyttende tuppen. Med fingrene og pekefingeren på din ikke-dominerende hånd, trykk forsiktig på glans for å utvide urinrørsåpningen. Med din dominerende hånd, før den beskyttende tuppen inn til platen kommer i kontakt med urinrørsåpningen. Før kateteret fremover til urin begynner å renne. Når urinstrømmen har stanset, trekk kateteret sakte ut. Dersom urin begynner å renne igjen, ta en pause til det stanser. Når du er sikker på at blæren er tom, fjern kateteret fullstendig. Skyv forhuden tilbake (dersom denne finnes).



Kast kateteret, posen og forpakningen i egnet beholder.

MÅ IKKE KASTES I TOALETET.



Vask hendene.

Forslag til stillinger for kateterisering



VaPro Plus kateter

Rød hette

bidrar til å holde den beskyttende tuppen ren og beskyttet etter forpakningen er åpnet

Beskyttende hylse

gjør at kateteret kan holdes hvor som helst og utgjør en barriere mot bakterier



Beskyttende tupp

bidrar til å beskytte mot bakterier lokalisert i de ytterste 15 mm av det distale urinrøret





1000 ml urinoppsamlingspose

For kateterisering hjemme eller på farten

Urinoppsamlingsposen er enkel å åpne og enkel å tømme for renere håndtering

Tilbakeslagsventil hindrer tilbakestrømming av urin

Transparent for visuell vurdering av urinfargen og måleenheter printet på posen for kontroll av urinvolumet



Finnes også som

VaPro Plus

Berøringsfritt intermitterende kateter


F-Style

VaPro Plus kateter – brukerveiledning



Finn frem det du trenger og gjør området klart. Vask hendene som anbefalt av helsepersonell.

Posisjoner deg for å utføre intermitterende kateterisering. Tilpass klærne slik at du har tilgang til genitaliene.

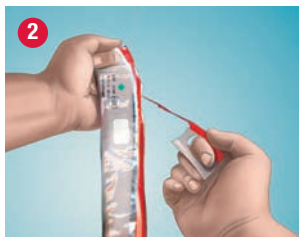


For å åpne forpakningen, dra fingerhullet mot deg og hele veien ned.

Hvis du ønsker, bruk det selvklebende merket på forpakningen for å feste kateteret mot en overflate mens du gjør deg klar til kateterisering.



Fjern kateteret fra forpakningen.

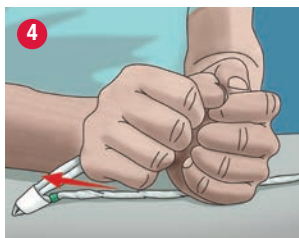

Løsne urinoppsamlingsposen ved å skyve papirbåndet mot kateteret og av posen, eller legg kateteret på en rett overflate og løsne båndet ved å løfte posen bort fra kateteret med bunnen av knyttneven.

Legg kateteret i fanget, på vasken eller på en annen rett overflate.



Hold penis med din ikke-dominerende hånd helt til du er ferdig med prosedyren. Trekk forhuden tilbake (om denne finnes). Penishodet (glans) og urinrørsåpningen vaskes daglig, slik du ble opplært av helsepersonell.



Fjern den røde hetten fra kateterets beskyttelsestopp.

Se neste siden for trinn 7-11

VaPro Plus kateter – brukerveiledning



Hold kateteret med én hånd, med den andre fører du kateteret fremover til tuppen av kateteret fyller beskyttelsestuppen, men ikke kommer utenfor.



Hold kateteret under platen på den beskyttende tuppen. Med fingrene og pekefingeren på din ikke-dominerende hånd, trykk forsiktig på glans for å utvide urinrørsåpningen. Med din dominerende hånd, før den beskyttende tuppen inn til platen kommer i kontakt med urinrørsåpningen. Før kateteret fremover til urin begynner å renne. Når urinstrømmen har stanset, trekk kateteret sakte ut. Dersom urin begynner å renne igjen, ta en pause til det stanser. Når du er sikker på at blæren er tom, fjern kateteret fullstendig. Skyv forhuden tilbake (dersom denne finnes).



Etter kateterisering, hold urinoppsamlingsposen i håndtaket.

For å tømme urinoppsamlingsposen før den kastes, riv ved merket "Tear here to empty".



Kast kateteret, posen og forpakningen
i egnet beholder.

MÅ IKKE KASTES I TOALETET.



Vask hendene.

Forslag til stillinger for kateterisering



VaPro 100% berøringsfritt intermitterende kateter

VaPro Pocket kateter



VaPro nr./ Farma nr.	Tupp	Str. lengde	Str. diameter	Eske stk.
70104/ 806010	Nelaton	M 40 cm	● Ch 10	30 stk
70124/ 984183	Nelaton	M 40 cm	○ Ch 12	30 stk
70144/ 981434	Nelaton	M 40 cm	● Ch 14	30 stk
70164/ 911301	Nelaton	M 40 cm	● Ch 16	30 stk

VaPro Plus Pocket kateter

- med urinoppsamlingspose



VaPro nr./ Farma nr.	Tupp	Str. lengde	Str. diameter	Eske stk.
71084/ 869943	Nelaton	M 40 cm	● Ch 8	30 stk
71104/ 905416	Nelaton	M 40 cm	● Ch 10	30 stk
71124/ 880473	Nelaton	M 40 cm	○ Ch 12	30 stk
71144/ 896567	Nelaton	M 40 cm	● Ch 14	30 stk
71164/ 917920	Nelaton	M 40 cm	● Ch 16	30 stk

VaPro kateter



VaPro nr./ Farma nr.	Tupp	Str. lengde	Str. diameter	Eske stk.
72084/ 945640	Nelaton	M 40 cm	● Ch 8	30 stk
72104/ 817446	Nelaton	M 40 cm	● Ch 10	30 stk
72124/ 965906	Nelaton	M 40 cm	○ Ch 12	30 stk
72144/ 889255	Nelaton	M 40 cm	● Ch 14	30 stk
72164/ 847093	Nelaton	M 40 cm	● Ch 16	30 stk

NB! For kateter med integrert pose kreves en egen resept:

5020105 Tappekater med pose, hydrofile

<https://www.helfo.no/pa-vegne-av-pasienten/blaresept/bla-resept>

VaPro kateter med Tiemann tupp



VaPro nr./ Farma nr.	Tupp	Str. lengde		Str. diameter	Eske stk.
73124/ 984449	Tiemann	M 40 cm	○	Ch 12	30 stk
73144/ 849601	Tiemann	M 40 cm	●	Ch 14	30 stk
73164/ 863281	Tiemann	M 40 cm	●	Ch 16	30 stk

VaPro F-style kateter

- et fastere alternativ



VaPro nr./ Farma nr.	Tupp	Str. lengde		Str. diameter	Eske stk.
7600084/ 840885	Nelaton	M 40 cm	●	Ch 8	30 stk
7600104/ 857362	Nelaton	M 40 cm	●	Ch 10	30 stk
7600124/ 832328	Nelaton	M 40 cm	○	Ch 12	30 stk
7600144/ 825718	Nelaton	M 40 cm	●	Ch 14	30 stk
7600164/ 978344	Nelaton	M 40 cm	●	Ch 16	30 stk

VaPro Plus kateter



VaPro nr./ Farma nr.	Tupp	Str. lengde		Str. diameter	Eske stk.
74124/ 996731	Nelaton	M 40 cm	○	Ch 12	30 stk
74144/ 981778	Nelaton	M 40 cm	●	Ch 14	30 stk

VaPro Plus F-style kateter

- et fastere alternativ med urinoppsamlingspose



VaPro nr./ Farma nr.	Tupp	Str. lengde		Str. diameter	Eske stk.
7700124/ 817812	Nelaton	M 40 cm	○	Ch 8	30 stk
7700144/ 893150	Nelaton	M 40 cm	●	Ch 10	30 stk

NB! For kateter med integrert pose kreves en egen resept:
5020105 Tappekateter med pose, hydrofile
<https://www.helfo.no/pa-vegne-av-pasienten/blaresept/bla-resept>

All informasjon i denne brosjyren er kun ment som generell informasjon og er ikke ment som medisinske råd. Vennligst se vår hjemmeside for sist oppdaterte informasjon, ettersom veiledninger kan og vil bli oppdatert. Følg alltid produktinstruksjonene for bruk, og konferer med helsepersonell dersom du skulle ha ytterligere spørsmål.

ADVARSEL: Brukes kun én gang for å redusere faren for infeksjon og/eller komplikasjoner.

Dersom du opplever ubehag eller tegn på traume, avslutt bruk umiddelbart og kontakt helsepersonell.

- Klart til bruk, intermitterende kateter til engangsbruk
- Beskyttende tupp og hylse bidrar til berøringsfri innføringsteknikk
- Fargekodet kateterskaft indikerer kateterets størrelse
- 1000 ml urinoppsamlingspose (kun VaPro Plus og VaPro Plus Pocket)
- Hydrofilt, ftalatfritt kateter
- 2 ultraglatte kateterøyne
- Beskyttelseshette som er enkel å fjerne
- Inneholder ikke lateks

INDIKASJONER FOR BRUK

Dette intermitterende kateteret er et fleksibelt rør som føres inn i urinrøret på mannlige, kvinnelige og pediatriske pasienter som trenger å tømme blæren.

FORHOLDSREGL: Rådfør deg med helsepersonell før bruk, dersom du opplever noen av følgende tilstander:

- Smerter i urinrøret
- Uttalt forsnævring
- Uretritt - betennelse i urinrøret
- Epididymitt - betestikkelbetennelse
- Uforklarlig blødning fra urinrøret
- Falsk passasje
- Prostatitt - betennelse i prostata

FORHOLDSREGL: Selvkategorisering må følge behandlingsplanen og kun utføres etter medisinsk rådgivning i samsvar med angitte anvisninger. Fordi kateteriseringsfrekvens varierer fra person til person, bør anbefalt frekvens for kateterisering oppgis av helsepersonell. Ta kontakt med helsepersonell for ytterligere spørsmål.

NB: Forpakningen skal oppbevares liggende og i normal romtemperatur. Dette produktet består av: hylse i polyuretan, tupp av termoplastisk elastomer og slanger som ikke er fremstilt av ftalater.

Reseptbelagt

Dansac and Hollister Norge

Olav Brunborgs vei 4

Postboks 273

1377 Billingstad

Tlf: 66 77 66 50 | E-mail: kundeservice.norge@hollister.com

www.vapro.no