

Å opprettholde
hudens naturlige
fuktighetsbalanse
**utgjør hele
forskjellen**



Hollister presenterer

Den komplette **CeraPlus** produktoversikten

Historien om Hollister

Historien om Hollister Incorporated startet i Chicago i 1921 da den unge entreprenøren John Dickinson Schneider grunnla et lite trykkeri. Fra første stund var selskapets filosofi at "kun det beste er godt nok". I løpet av tiårene som fulgte utviklet selskapet seg fra å være et trykkeri til å produsere medisinsk utstyr av høy kvalitet under navnet Hollister.

Tidlig på 1960-tallet kom en ansatt, som hadde et familiemedlem med stomi, til John Dickinson Schneider med en idé til utvikling av stomiutstyr. Med innovative løsninger og produkter av høy kvalitet skapte Hollister Incorporated en revolusjon innenfor stomipleie og tilbød stomiopererte sårt tiltrengte løsninger. I årene som fulgte utvidet selskapet produksortimentet med løsninger til urinretensjon, sårpleie og intensiv pleie.

I dag utvikler, produserer og markedsfører selskapet medisinske produkter og tjenester i over 90 land. I 1989 kjøpte Hollister Inc. det danske selskapet Dansac A/S.

Hollister åpnet sitt salgskontor i Norge 1. januar 1994 etter å ha solgt sine produkter på det norske markedet siden 1970-tallet. I dag holder Dansac and Hollister Norge til på Billingstad utenfor Oslo. Vi er en engasjert gjeng med fullt fokus på kundens beste, både innen Hollister stomi, Hollister inkontinens og Dansac stomi.

Innhold

Historien om CeraPlus	4
CeraPlus hudplater	6
CeraPlus 1dels lukket pose med flat plate	8
CeraPlus 1dels lukket pose med konveks plate	10
CeraPlus 1dels tømbær pose med flat plate.....	12
CeraPlus 1dels tømbær pose med Soft Konveks plate.....	14
CeraPlus 1dels tømbær pose med konveks plate	16
Adapt CeraRing	18
Riktig bruk av CeraRing	20
Riktig bruk av CeraRing på 1dels stomipose	22

Historien om CeraPlus

CeraPlus er Hollisters nyeste serie av stomiutstyr og fås i både 1dels og 2delt. Hudplatene er tilsatt fettstoffet Ceramid, derav navnet CeraPlus. CeraPlus ble først lansert som et 2delt system i 2014. Da det gjennom gode erfaringer viste seg at CeraPlus hadde en svært god effekt på peristomal hud, ble sortimentet utviklet og utvidet med både en 1dels serie og tetningsringer tilsatt Ceramid.


Ceramid er et fettstoff (lipid) som finnes naturlig i huden. Dette fettstoffet har som oppgave å binde sammen hudcellene i det ytterste hudlaget, stratum corneum, slik at de opptrer som en vanntett, beskyttende barriere.

Utformingen av stratum corneum kan best beskrives som et “murstein og mørtel” mønster. Cellene representerer murstein og ceramid representerer mørtel. Begge deler kreves for en sunn og normalt fungerende hud.

Den vanntette barrieren som hudcellene og den tilførte ceramiden danner, forhindrer uttørring og sprekkdannelser i det ytterste hudlaget. Den beskytter også huden rundt stomien mot ytre påvirkning i form av irriterende og bakterier fra avføring eller urin eller hyppige plateskift.

CeraPlus er nå både et etablert og anerkjent navn innen stomiutstyr. For dem som ikke har gjort seg kjent med platene ennå, har vi forsøkt å sette de mest vanlige spørsmål og svar i røde bokser gjennom heftet.

Hilsen oss i Hollister

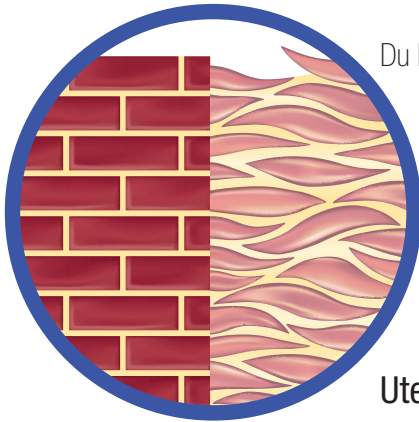

Du kan tenke på frisk hud som en murvegg

Hudceller tilsvarer murstein

Ceramid tilsvarer mørtel

Uten mørtel vil veggen rase sammen

Hvordan kan Ceramid i CeraPlus hudplater bidra til sunn peristomal hud?

Som med andre hudplater vil klebematerialet i CeraPlus hudplaten integreres med det ytterste hudlaget. Fordi CeraPlus inneholder Ceramid vil det ytterste hudlaget komme i kontakt med og beskyttes av Ceramiden i hudplaten.

CeraPlus hudplater

CeraPlus hudplater var det første produktet i CeraPlus serien. Platene finnes både i flat og konveks versjon. De flate platene er oppklippbare, mens de konvekse platene både finnes som oppklippbare og i ulike ferdigstansede størrelser. Platene har Hollisters unike tapekant for ekstra sikkerhet og fleksibilitet. I likhet med de andre Hollister hudplatene fester de umiddelbart på huden og har løftbar koblingsring.

CeraPlus hudplater passer til alle Conform 2 poser.

Vil CeraPlus lindre peristomal kløe?

Ceramider beskytter huden mot væsketap som i sin tur kan føre til hudskader, tørrhet og kløe. Det er dokumentert at tørr, irritert og sensitiv hud oftest mangler Ceramid. Ved å opprettholde hudens naturlige fuktighetsbalanse kan problemet med kløe i den peristomale huden løses.



Flate plater

	Ringstørrelse	Starthull mm	REF	Varenummer	Stk.
●	45 mm	13-30 ✂	14500	899725	5
●	55 mm	13-40 ✂	15500	870149	5
●	70 mm	13-55 ✂	17500	872607	5

Konvekse plater

	Ringstørrelse	Starthull mm	REF	Varenummer	Stk.
●	45 mm	13-25 ✂	14600	877695	5
●	45 mm	20	14620	869964	5
●	45 mm	25	14625	813145	5
●	55 mm	13-38 ✂	15600	842352	5
●	55 mm	29	15629	860612	5
●	55 mm	32	15632	834815	5
●	70 mm	13-51 ✂	17600	961292	5

CeraPlus 1dels lukket pose med flat plate

CeraPlus 1dels lukket pose med flat plate kommer i posestørrelse Midi og rommer 580ml. Det finnes en oppklippbar variant, samt tre ferdigstansede størrelser.

Posene har en myk, beige forside med inspeksjonsluke som gjør det mulig å kontrollere både stomien og poseinnholdet. Inspeksjonsluken må fysisk åpnes, så om du ikke ønsker å se beholder du den lukket.

Alle ferdigstansede poser har sveisen mellom pose og plate tett til stomiåpningen – som igjen gir ekstrem fleksibilitet og maksimal effekt av platens gode egenskaper.

Alle Hollisters poser kommer med AF300 filter som bidrar til luktfri passasje av gass.

Hvis CeraPlus hudplaten hjelper huden å holde på fuktigheten, vil det føre til at huden masereres*?

CeraPlus bidrar til å opprettholde hudens fuktighetsbarriere. Når den peristomale huden er frisk vil minimale mengder av fuktighet slippe ut. Huden holdes altså hydrert, men ikke maserert

*Maserasjon: oppløsning av huden, f.eks i forbindelse med oppbløting av huden



Størrelse	Starthull mm	REF	Varenummer	Stk.
Midi	15-55 ✂	52100	963906	30
Midi	25	52125	892726	30
Midi	30	52130	910027	30
Midi	35	52135	994989	30

CeraPlus 1dels lukket pose med konveks plate

CeraPlus 1dels lukket pose med konveks plate kommer i posestørrelse Midi og rommer 580ml. Det finnes to oppklippbare varianter, samt tre ferdigstansede størrelser. Platen har 4,16 mm fast konveksitet.

Posene har en myk, beige forside med inspeksjonsluke som gjør det mulig å kontrollere både stomien og poseinnholdet. Inspeksjonsluken må fysisk åpnes, så om du ikke ønsker å se beholder du den lukket.

Alle ferdigstansede poser har sveisen mellom pose og plate tett til stomiåpningen – som igjen gir ekstrem fleksibilitet og maksimal effekt av platens gode egenskaper.

Alle Hollisters poser kommer med AF300 filter som sikrer luktfri passasje av gass.

Vil Ceramid forårsake hudsensitivitet?

Det har ikke vært rapportert overfølsomhet for CeraPlus. Ceramid er en naturlig bestanddel i huden og skal derfor ha meget lave nivåer av sensitivetsreaksjoner.



Størrelse	Starthull mm	REF	Varenummer	Stk.
Midi	15-38 ✂	52600	825455	30
Midi	15-51 ✂	52601	838123	30
Midi	25	52625	957735	30
Midi	30	52630	837308	30
Midi	35	52635	915771	30

CeraPlus 1dels tømbar pose med flat plate

CeraPlus 1dels tømbar pose med flat plate finnes i to størrelser; Midi som rommer 580 ml og Maxi som rommer 780 ml. Begge størrelser kommer i en oppklippbar variant, samt tre ferdigstansede størrelser. Platen har tapekant for ekstra sikkerhet og fleksibilitet.

Posene har en myk, beige forside med inspeksjonsluke som gjør det mulig å kontrollere både stomien og poseinnholdet. Inspeksjonsluken må fysisk åpnes, så om du ikke ønsker å se beholder du den lukket.

Alle ferdigstansede poser har sveisen mellom pose og plate tett til stomiåpningen – som igjen gir ekstrem fleksibilitet og maksimal effekt av platens gode egenskaper.

Alle Hollisters poser har AF300 filter som bidrar til luktfri passasje av gass.

Vil CeraPlus hudplaten avgi Ceramid til huden rundt stomien?

CeraPlus hudkleber er tilført Ceramid for å forsterke og beskytte det ytterste laget av huden, stratum corneum. Kleberen frigir ikke Ceramid, men gir effekt så lenge den sitter på huden.



Størrelse	Starthull mm	REF	Varenummer	Stk.
Midi	15-64 ✂	54200	889476	30
Midi	25	54225	860347	30
Midi	30	54230	819785	30
Midi	35	54235	880082	30
Maxi	15-64 ✂	54300	897966	30
Maxi	25	54325	882111	30
Maxi	30	54330	825233	30
Maxi	35	54335	965157	30

CeraPlus 1dels tømbar pose med Soft Konveks plate

CeraPlus 1dels tømbar pose med Soft Konveks hudplate finnes i to størrelser; Midi som rommer 580 ml og Maxi som rommer 780 ml. Begge størrelser kommer i tre oppklippbare varianter, samt tre ferdigstansede størrelser. Platen har 6 mm myk konveksitet og tapekant for ekstra sikkerhet og fleksibilitet.

CeraPlus Soft Konveks er en myk og trygg løsning for de som trenger det lille ekstra. Platen gir et lett trykk rundt stomien og tilpasser seg ujevne hudoverflater.


Posene har en myk, beige forside med inspeksjonsluke som gjør det mulig å kontrollere både stomien og poseinnholdet. Inspeksjonsluken må fysisk åpnes, så om du ikke ønsker å se beholder du den lukket.

Alle ferdigstansede poser har sveisen mellom pose og plate tett til stomiåpningen – som igjen gir ekstrem fleksibilitet og maksimal effekt av platens gode egenskaper.

Alle Hollisters poser kommer med AF300 filter som sikrer luktfri passasje av gass.

Når en hudplate er tilført Ceramid, vil den opprettholde de samme egenskapene som tidligere?

CeraPlus har de samme gode, absorberende og fleksible egenskapene som Hollister er kjent for. I tillegg til de komponentene som er nødvendige for at platen skal fungere optimalt, er platen tilsatt Ceramid som gjør at den av mange oppleves som enda mer fleksibel og behagelig.

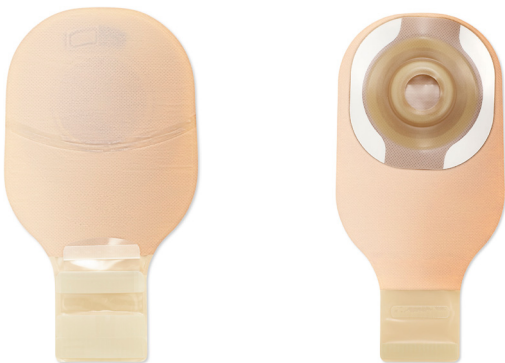

Størrelse	Starthull mm	REF	Varenummer	Stk.
Midi	15-38 ✂	54000	953295	30
Midi	15-51 ✂	54001	874063	30
Midi	15-25 ✂	54002	845920	30
Midi	25	54025	883963	30
Midi	30	54030	900293	30
Midi	35	54035	981474	30
Maxi	15-38 ✂	54100	834764	30
Maxi	15-55 ✂	54101	978727	30
Maxi	15-25 ✂	54102	815900	30
Maxi	25	54125	886312	30
Maxi	30	54130	856538	30
Maxi	35	54135	822188	30

CeraPlus 1dels tømbar pose med konveks plate

CeraPlus 1dels tømbar pose med konveks plate finnes i to størrelser; Midi som rommer 580 ml og Maxi som rommer 780 ml. Begge størrelser kommer i tre oppklippbare varianter, samt tre ferdigstansede størrelser. Platen har 4,16 mm fast konveksitet og tapekant for ekstra sikkerhet og fleksibilitet.


Posene har en myk, beige forside med inspeksjonsluke som gjør det mulig å kontrollere både stomien og poseinnholdet. Inspeksjonsluken må fysisk åpnes, så om du ikke ønsker å se beholder du den lukket.

Alle ferdigstansede poser har sveisen mellom pose og plate tett til stomiåpningen – som igjen gir ekstrem fleksibilitet og maksimal effekt av platens gode egenskaper.

Alle Hollisters poser kommer med AF300 filter som bidrar til luktfri passasje av gass.

Hvordan er Ceramid i hudplaten produsert?

CeraPlus hudplate er tilført Ceramid som er produsert i et laboratorium (ikke hentet fra plante eller animalske kilder). Ceramid i platen har identisk molekylstruktur som ceramid i huden din.

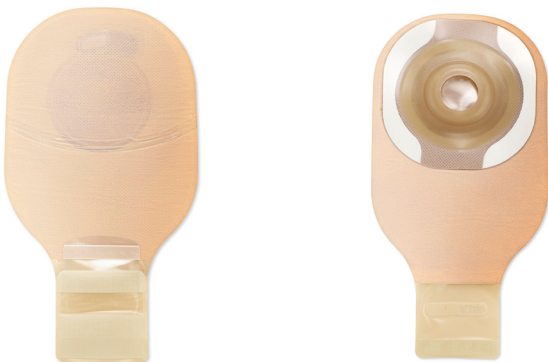

Størrelse	Starthull mm	REF	Varenummer	Stk.
Midi	15-38 ✂	54600	984087	30
Midi	15-51 ✂	54601	847415	30
Midi	15-25 ✂	54602	896657	30
Midi	25	54625	931640	30
Midi	30	54630	892475	30
Midi	35	54635	849607	30
Maxi	15-38 ✂	54800	934780	30
Maxi	15-55 ✂	54801	879673	30
Maxi	15-25 ✂	54802	918802	30
Maxi	25	54825	929197	30
Maxi	30	54830	984057	30
Maxi	35	54835	943904	30

Adapt CeraRing

Adapt CeraRing fyller ut ujevnheter i huden og er dermed med på å beskytte huden rundt stomien, samt forebygge lekkasje. Ringen kan formes, strekkes og deles uten å miste klebeevnen. Rask og høy absorpsjon av væske gir umiddelbart feste.

Adapt CeraRing finnes i to tykkelser; 2 mm og 4 mm.

Har Ceramid en maksimal levetid?

Det er ingen ting som tilsier at Ceramid vil bli brutt ned etter en bestemt tidsperiode.

Er det Ceramid i tapen?

Tapekanten rundt platen inneholder ikke Ceramid.



Størrelse mm	Tykkelse mm	REF	Varenummer	Stk.
18-48 mm	2 mm	8815	929311	10
18-48 mm	4 mm	8805	994326	10


Kan jeg bruke en platefilm eller hudbeskyttende serviett sammen med CeraPlus?

Det er ikke anbefalt å bruke hudbeskyttende tilbehør som ikke inneholder Ceramid. CeraPlus fungerer best når den kommer i direkte kontakt med huden, og hudbeskyttende tilbehør vil minimere denne kontakten.

Riktig bruk av CeraRing




1. Hollister Adapt CeraRing brukes for ekstra oppsugning av fuktighet innerst ved stomien og bidrar til sunn og hel hud.

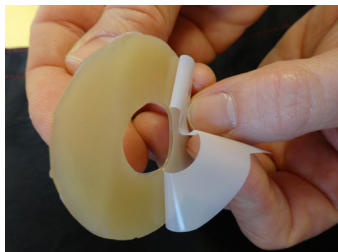

2. Fjern den hvite plastfolien etter at produktet er lett forvarmet (gni litt på ringen for å aktivere klebekomponentene).



3. Trekk i ringen til den er litt mindre enn stomiens størrelse.

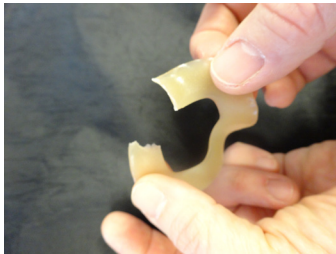

4. Riv ringen i to.



5. Legg den øverste kanten inntil, men ikke oppå stomien. For å redusere risikoen for lekkasje legges skjøten i øvre kant.



6. Her er ringen perfekt tilpasset.



7. Til slutt legges platen på. Siden tetningsringen beskytter huden helt innerst ved stomien kan en tillate at åpningen i platen er litt større enn selve stomien.

Riktig bruk av CeraRing på 1dels stomipose



1. Klipp til en mal i samme størrelse som stomien din.



2. Finn frem posen med hullstørrelse tilsvarende den bredeste delen av stomien din.



3. Åpne inspeksjonsluken foran på posen.




4. Legg malen inn i inspeksjonsluken og snu posen. Du ser stomistørrelsen gjennom åpningen i den ferdig hullede posen. Neste skritt er å dekke området av pappmalen med tetningsringen.




5. Fjern beskyttelsesfilmen på posen.



6. Fjern den hvite plastfolien på tetningsringen etter at produktet er lett forvarmet (gni litt på ringen for å aktivere klebekomponentene).

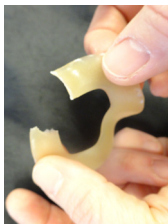

7. Riv ringen i to.

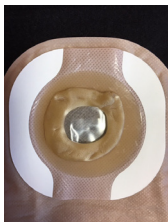

8. Legg ringen på posen slik at du dekker pappmalen. Start slik at skjøten i ringen ikke ligger der stomien er mest aktiv.



9. Når du ser inn i posen gjennom inspeksjonsluken ser du hvordan ringen dekker opp for åpningens sirkulære form. Slik vil den passe akkurat din stomi perfekt.

Dersom du er interessert i vareprøver, har spørsmål om produktene eller bare har lyst til å høre mer om Ceramid, synes vi det er veldig hyggelig om du tar kontakt med en av oss på Hollister teamet !



Wenche Strøm-Magnussen
Produktsjef
995 33 054



Hege Bjørgan
Sykepleier/distrikssjef
413 33 793



Benedicte Larsen,
Stomisykepleier/distrikssjef
915 25 872



Ellen Bratlie,
Salgssjef
901 77 121



Daghild Trodal,
Kundeservice
66 77 66 50



Kristin Cardo,
Kundeservice
66 77 66 50