



Ditt personlige øvesett

Øvesettet er ment som læring i hvordan du setter på et stomiutstyr og simulerer bruk av stomiutstyr for personer som forbereder seg på en stomioperasjon.

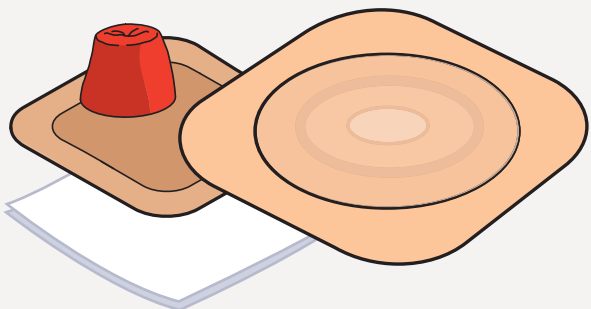


1

Fjern dekkpapiret fra treningsplaten, og sett platen på magen din på stedet som stomisykepleieren eller helsepersonellet har angitt.

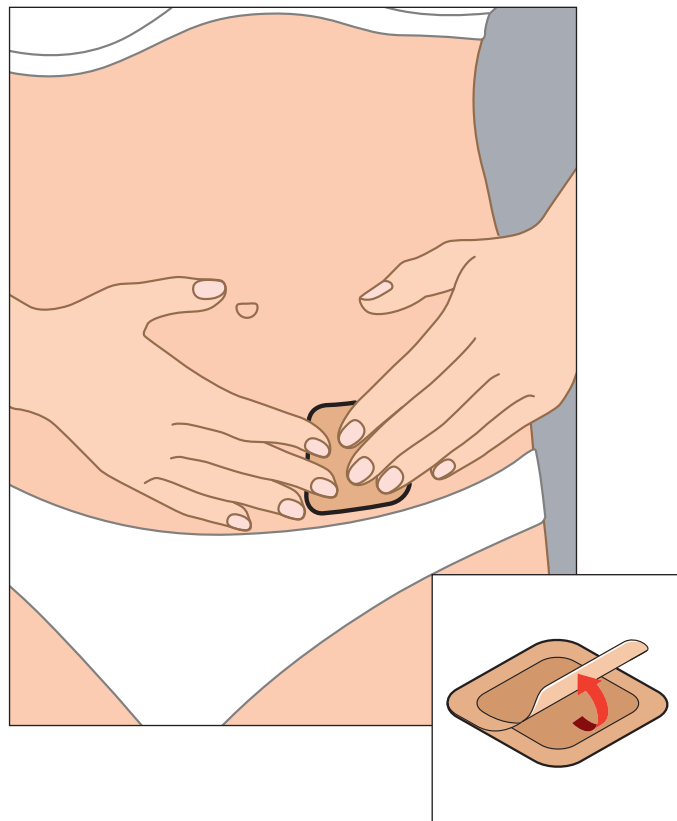


2

Fjern dekkpapiret fra stomimodellen, og sett den på treningsplaten som allerede sitter på magen din.

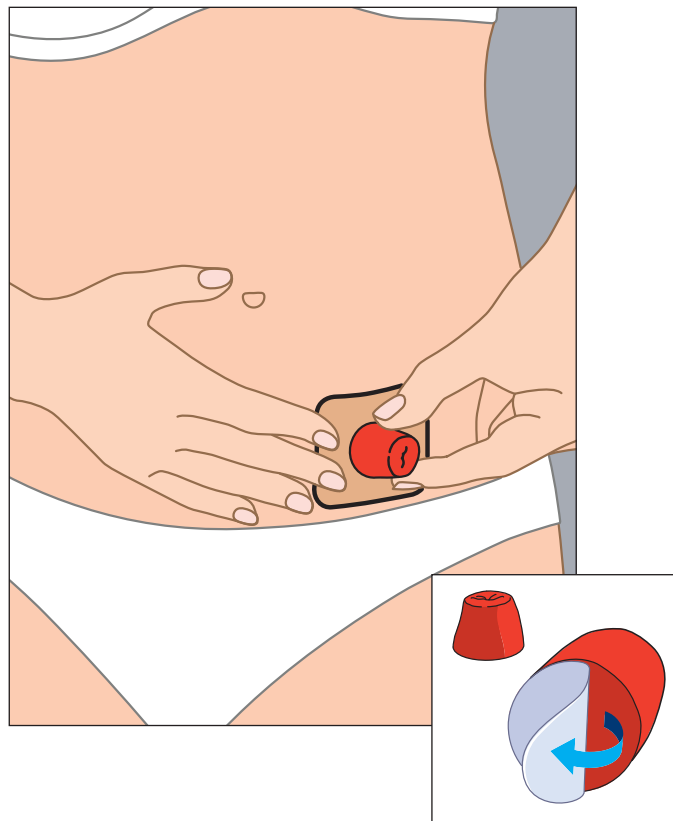

3

Fjern dekkpapiret fra hudplaten. Midtstill hullet over stomimodellen, og trykk hudplaten forsiktig mot treningsplaten og huden. Spør stomisykepleieren din eller helsepersonell om råd ved behov.

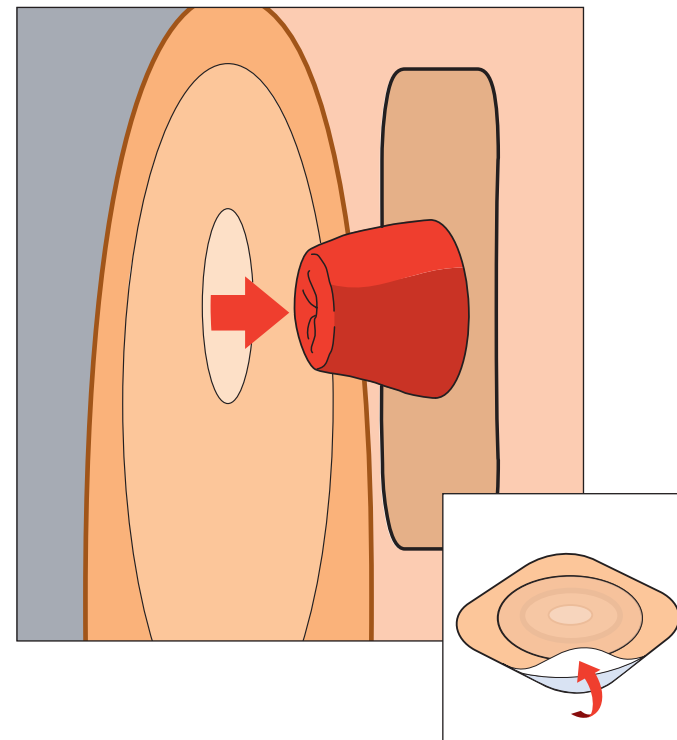

Dansac and Hollister Norge
Olav Brunborgs vei 4, 1396 Billingstad
Tlf: 66 77 66 50
kundeservice.norge@hollister.com
www.hollister.no

Hollister, Hollister logoen og "Healthy skin. Positive outcomes." er varemerker tilhørende Hollister Incorporated.
© 2022 Hollister Incorporated
www.hollister.com



Hollister Incorporated
2000 Hollister Drive
Libertyville, IL 60048 USA




Hollister ULC
Foxford Road, Ballina
Co. Mayo, Ireland



Ostomy Care
Healthy skin. Positive outcomes.


4

Hvis du bruker et todelt posesystem, fester du posen på hudplaten.

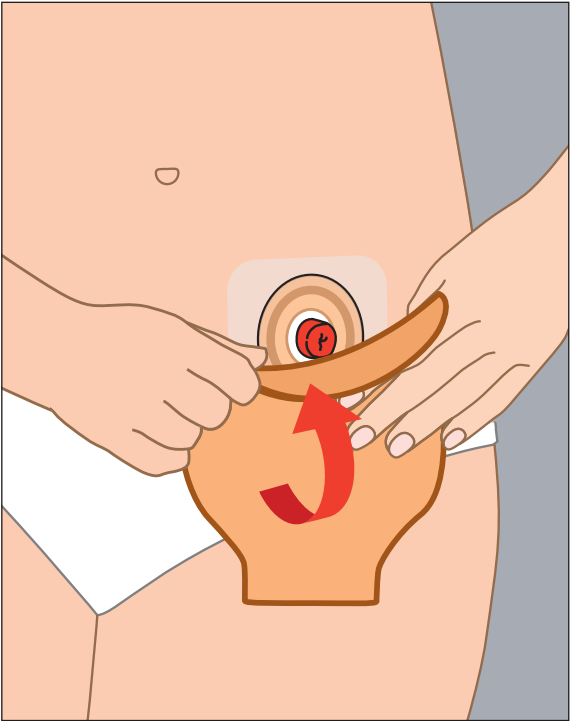


5

For å fjerne treningsplaten og stomiposen, trekker du hudplaten forsiktig av huden. Start øverst. Trekk hudplaten forsiktig ned til den er fullstendig fjernet. Treningsplaten og stomimodellen vil sannsynligvis også bli fjernet.

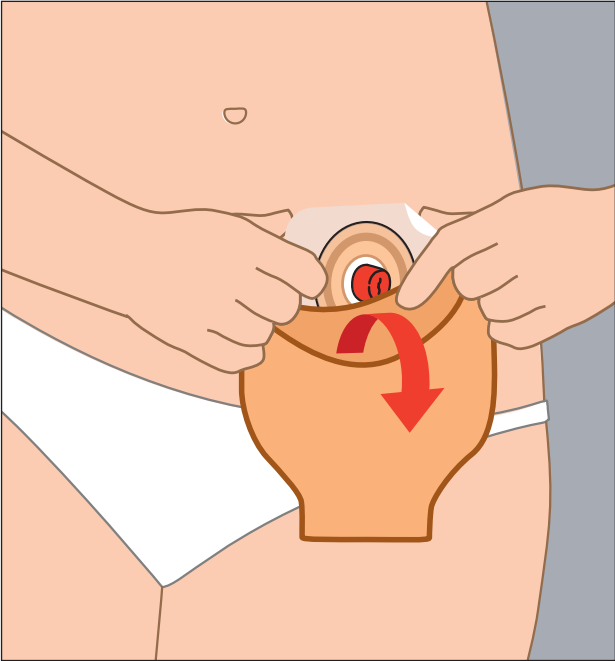

Valgfritt: Kleberfjernerervietten (inkludert) kan brukes mens du fjerner hudplaten og treningsplaten fra huden. Se bruksanvisningen som følger med klebefjernererviettene.

Følg alle lokale forskrifter for avhending.

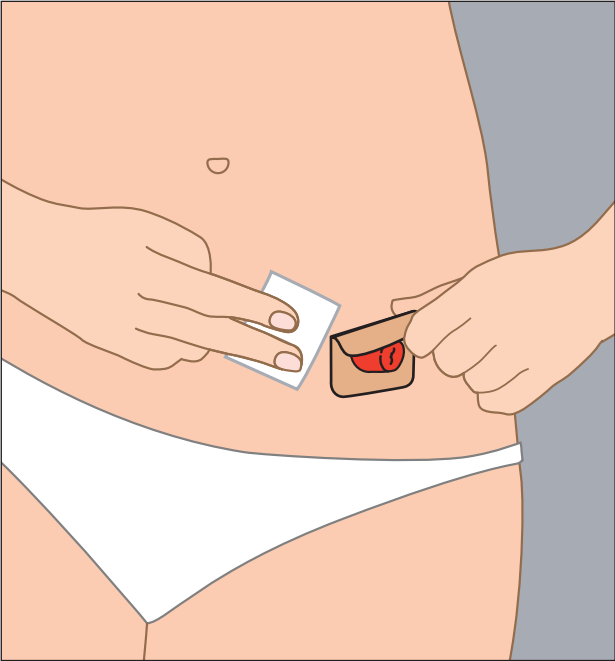

Innhold i treningssettet for stomipose

- 2 treningsplater
- 2 stomimodeller
- Stomiutstyr blir levert ut av stomisykepleier eller helsepersonell
- 2 klebefjernerervietter

Produktbeskrivelse

Treningsplaten, stomimodellen og stomiposesystemet (se Innhold) er designet for å bli fjernet og kastet etter treningsperioden. Treningsplaten og stomiposeplaten er laget av hydrokolloid hudklebemiddel, polymer-/kopolymerplast og ikke-vevd tekstil. Stomimodellen er laget av PU (polyuretan). Ikke laget med naturlig gummilateks.

Indikasjoner og tiltenkt bruk

Øvesettet er ment som læring i hvordan du setter på et stomiutstyr og simulerer bruk av stomiutstyr for personer som forbereder seg på en stomioperasjon.

Advarsler


Gjenbruk av et enkeltprodukt kan forårsake potensiell risiko for brukeren, for eksempel dårlig klebing.

Forholdsregler

Må bare brukes som angitt. Avslutt bruk dersom det oppstår irritasjon. Hvis stomimodellen settes rett på huden, kan det oppstå skade (f.eks. irritasjon, skadet hud, utslett eller rødhet).

Merknader

For å sikre god klebing av treningsplaten bør huden være ren og tørr. Ikke bruk oljer eller lotion. Disse produktene kan påvirke klebeevnen til hudplaten. Ta kontakt med en stomisykepleier eller annet helsepersonell for hjelp med stomiutstyret eller hvis det oppstår hudirritasjon. Ved alvorlig skade (hendelse) knyttet til din bruk av produktet kontakter du din lokale distributør eller produsent og din lokale kompetente myndighet (www.hollister.com/authority).

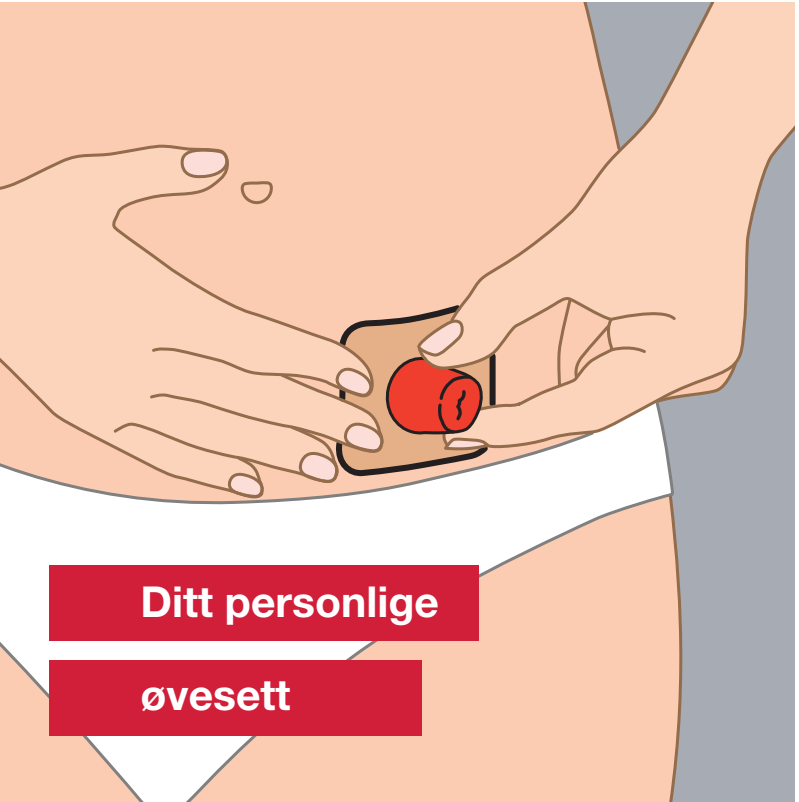

Ostomy Care
Healthy skin. Positive outcomes.