



InView™ silikonuridom for menn


Et godt alternativ til bleier

1. **InView™ Standard uridom (totallengde ~ 8,5 cm)** – meget enkel å bruke, til å stole på og komfortabel.
2. **InView™ Extra uridom (totallengde ~ 8,5 cm)** – ekstra lang klebeflate - gir ekstra sikkerhet og ekstra godt feste.
3. **InView™ Special uridom (totallengde ~ 6 cm)** – kortere lengde og riktig plassert kleber. Passer godt til menn med kortere penis som opplever at standardstørrelsen er vanskelig å håndtere.



- **Hudvennlig og selvklebende**
– Lett å feste med god kleber
- **Silikon, latexfritt materiale**
– Kan tilpasses individuelt
– Komfortabel i bruk
- **Gjennomsiktig, klar silikonfilm**
– Diskré
– Gir muligheter for observasjon av huden uten å måtte fjerne uridomet

InView™ Standard uridom

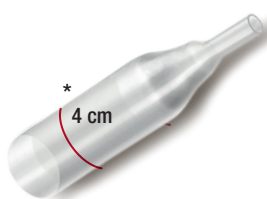

Størrelse	(diameter)	Omkrets	Varenr.	HELFO nr.	Eske stk.
●	25 mm	~70 mm	97225	898638	30 stk
●	29 mm	~80 mm	97229	867752	30 stk
●	32 mm	~90 mm	97232	839202	30 stk
●	36 mm	~105 mm	97236	905898	30 stk
●	41 mm	~125 mm	97241	875543	30 stk

InView™ Extra uridom



Størrelse	(diameter)	Omkrets	Varenr.	HELFO nr.	Eske stk.
●	25 mm	~70 mm	97325	952698	30 stk
●	29 mm	~80 mm	97329	851158	30 stk
●	32 mm	~90 mm	97332	864299	30 stk
●	36 mm	~105 mm	97336	845061	30 stk
●	41 mm	~125 mm	97341	878938	30 stk


InView™ Special uridom



Størrelse	(diameter)	Omkrets	Varenr.	HELFO nr.	Eske stk.
●	25 mm	~70 mm	97125	901185	30 stk
●	29 mm	~80 mm	97129	921091	30 stk
●	32 mm	~90 mm	97132	913317	30 stk
●	36 mm	~105 mm	97136	936242	30 stk
●	41 mm	~125 mm	97141	816213	30 stk

Størrelsesguide InView™ uridom

Kan bestilles via Hollister kundeservice

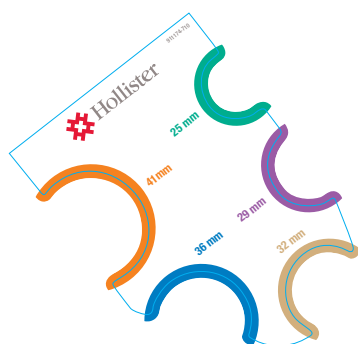

* Klebeområde


InView™ uridomer refunderes på "Blå resept"

InView™ silikonuridomer


Komfort og sikkerhet for bedre livskvalitet




Bruerveiledning

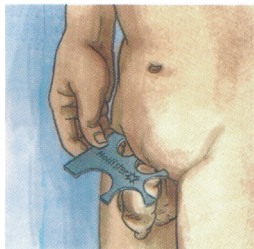


- 1 Finn riktig størrelse på ditt InView™ uriom ved å legge måleguiden over den tykkeste delen av penis og les av den størrelsen som passer.

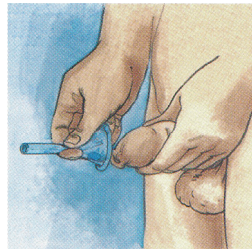


- 5 Hold i penis, klem sammen tuppen på InView™ uridomet og sett det mot tuppen av glans.

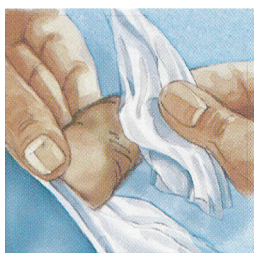

- 2 Barber eller klipp forsiktig bort hår som vil komme i konflikt med uridomet. Alternativt kan man brette en serviett, klippe et hull, tre penis gjennom hullet og trekke servietten helt opp. Hårene vil da ikke komme i konflikt med uridomet. Servietten kan fjernes når uridomet er satt på. Vask penis grundig 1 gang om dagen med vann og mild såpe. Tørk godt. Bruk ikke oljer, kremer eller pudder på huden da disse vil kunne redusere klebeeffekten på uridomet. Hvis du er omskåret, la forhuden bli i naturlig posisjon. Bruk ikke InView™ uridom på irritert eller sår hud.

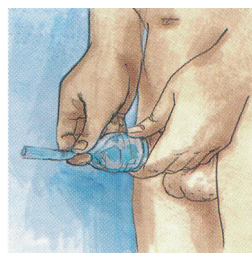


- 6 Hold fortsatt i InView™ uridomets tupp med den ene hånden. Dette sikrer at det blir et lite reservoar foran penis. Rull InView™ uridomet på, opp langs hele penis med den andre hånden.

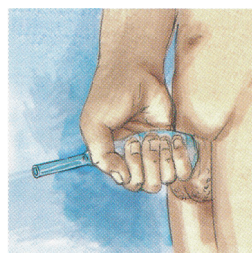


- 7 Klem forsiktig rundt penis slik at kleberen aktiveres og uridomet får et sikkert feste.




- 3 Fjern emballasjen rundt InView™ uridomet ved å rive langs den perforerte linjen på emballasjen.

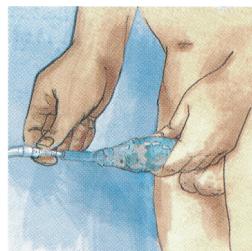

- 8 Koble tuppen på InView™ uridomet sammen med en urinopsamlingspose.

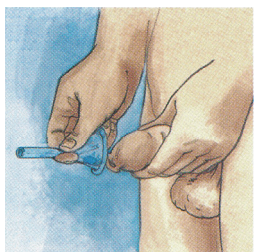

- 4 For InView™ Extra og InView™ Special; fjern den hvite koppen. Klem sammen uridomet rett i overkant av tuppen på den hvite koppen og ta den bort.

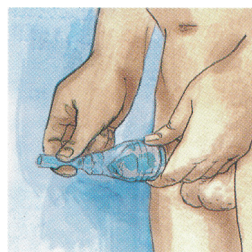

- 9 Fjern InView™ uridomet ved å rulle det forsiktig ned langs penis. Dersom du opplever det problematisk å fjerne uridomet, kan du holde en myk klut godt fuktet med varmt vann og såpe, rundt uridomet og penis i ca 30 sek. Dette reduserer klebeeffekten mot huden og uridomet blir lettere å rulle av.

Dansac and Hollister Norge

Olav Brunborgs vei 4

1396 Billingstad

Telefon: 80 02 65 56

kundeservice.norge@hollister.com

www.hollister.no

Advarsler: Gjenbruk av et engangsprodukt kan forårsake potensiell risiko for brukeren, for eksempel dårlig klebing, lekkasje eller hudirritasjon. Forholdsregler: Ikke bruk på irritert eller skadet hud. Ikke bruk hvis det oppstår en allergisk reaksjon. Påse riktig bruk i henhold til bruksanvisningen. Hvis størrelsen på uridomet er feil eller lekkasje forekommer, kan hudskade oppstå (f.eks. irritasjon, skadet hud, utslett eller rødhet). Dette kan forkorte brukstiden. Følg retningslinjene for fjerning hvis det oppstår hevelse, nummenhet, ubehag, smerte, misfarging eller uvanlig utseende. Merknader: For å sikre god hygiene må kateteret skiftes daglig. For å sikre god klebing bør huden være ren og tørr. Ikke bruk lotion, pudder eller salve på huden, da disse produktene kan påvirke klebingen til produktet. Kontakt helsepersonell hvis du trenger hjelp med produktet eller med hudirritasjon. Ved alvorlig skade (hendelse) knyttet til din bruk av produktet, kontakter du din lokale distributør eller produsent og din lokale kompetente myndigheter. For mer informasjon, se www.hollister.com/authority eller kontakt med EC-representant eller lokal distributør.