

TIPS OG GODE RÅD

Riktig bruk av Adapt CeraRing til stomiopererte


Adapt™



1. Hollister Adapt Cera-Ring brukes for ekstra oppsugning av fuktighet innerst ved stomien og bidrar til hel og sunn hud




6. Her er ringen perfekt tilpasset.

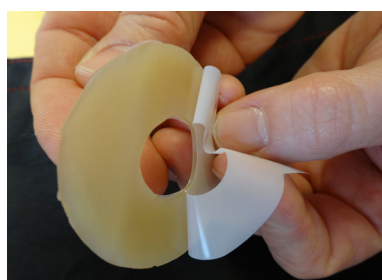


2. Fjern den hvite plast-folien etter at produktet er lett forvarmet (gni litt på ringen for å aktivere klebekomponentene).



7. Til slutt legges platen på. Siden tetningsringen beskytter huden helt innerst ved stomien kan en tillate at åpningen i platen er litt større enn selve stomien.

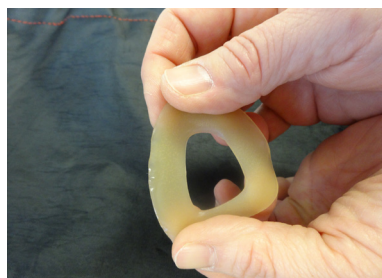

3. Trekk i ringen til den er litt mindre enn stomiens størrelse.

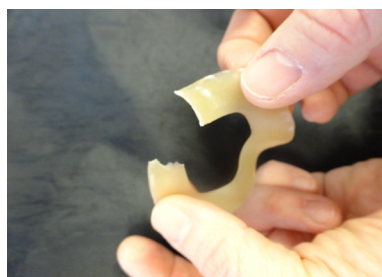

4. Riv ringen i to.



5. Legg den øverste kanten tett inntil, men ikke oppå stomien. For å redusere risikoen for lekkasje legges skjøten i øvre kant.

Husk at stomier endrer størrelse ut i fra om de er i en aktiv eller passiv fase; når de tømmer er de vanligvis større i diameter.

Tetningsringen kan like gjerne brukes på 1-dels utstyr som Moderma Flex

Hollister Adapt Tetningsringer finnes i flere størrelser

Adapt CeraRing

Størrelse	Antall per eske	Varenummer
18 x 48 mm, 2mm	10	8815 / 929311
18 x 48 mm, 4mm	10	8805 / 994326

Adapt Tetningsring

Størrelse	Antall per eske	Varenummer
18 x 48 mm, 2mm	10	7815 / 870555
18 x 98 mm, 2mm	10	7806 / 921862
18 x 48 mm, 4mm	10	7805 / 870555