



SOYEZ PRÊTS!

Il suffit de le mettre en place puis de le fixer. Aucune hydratation n'est requise.

Utiliser quand :

- des propriétés antibactériennes sont nécessaires pour aider à prévenir l'infection
- une absorption de niveaux modérés ou élevés d'exsudat est requise
- une thérapie de compression est requise
- quand un plâtre de contact total est nécessaire

Application :

- Il suffit de le positionner et de le fixer : aucune hydratation requise
- Un pansement secondaire n'est pas nécessaire
- Un ruban adhésif ou un bandage est requis pour le fixer

Choisir la taille et appliquer



Choisir la taille de pansement appropriée en s'assurant que le pansement couvre toute la plaie.

Utiliser avec une compression



Le pansement mousse Hydrofera Blue READY peut aussi être utilisé en conjonction avec un bandage de compression ou un plâtre de contact total.

Couvrir



Fixez Hydrofera Blue READY avec un pansement de fixation (ex. : ruban adhésif).

Temps de port



Le pansement peut être laissé en place jusqu'à 7 jours, en fonction du niveau d'exsudat et de l'état clinique de la peau.

Pour commander - Pansement mousse Hydrofera Blue READY

N° de produit	Dimensions du produit	Quantité/boîte
HBRS2520	6,4 x 6,4 cm (2.5 x 2.5 po)	10
HBRS4520	10,2 x 12,7 cm (4 x 5 po)	10
HBRS8820	20,3 x 20,3 cm (8 x 8 po)	10

Pour plus d'information, consultez les instructions qui sont fournies avec le produit.

Pour des questions sur les produits ou pour des échantillons, veuillez téléphoner au service à la clientèle au 1 800 263-7400 ou communiquer avec votre représentant(e) Hollister.

Fabriqué pour:
Hollister Incorporated
2000 Hollister Drive
Libertyville, IL 60048 É.-U.

Distribué au Canada par :
Hollister Limited
95 Mary Street
Aurora, Ontario L4G 1G3

Le logo Hollister est une marque déposée de Hollister Incorporated. Hydrofera Blue Ready et son logo sont des marques déposées de Hydrofera, LLC.

©2015 Hollister Limited.

922497-CA

www.hollister.com

